




BIOCONTROL
Veterinär. Labor. Partner.


Gefrorene Proben – So geht's

Damit Ihre Proben gefroren im Labor eintreffen, empfehlen wir folgendes Vorgehen:

EINFRIEREN

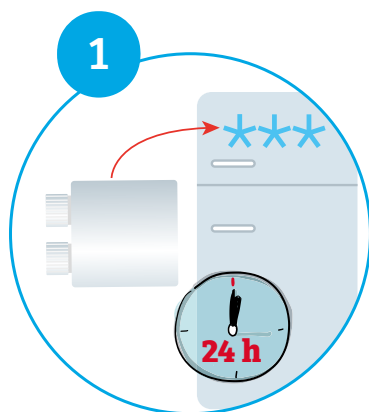


Kunststoffbehälter für
mind. 24 Stunden in das
Gefrierfach **legen**.

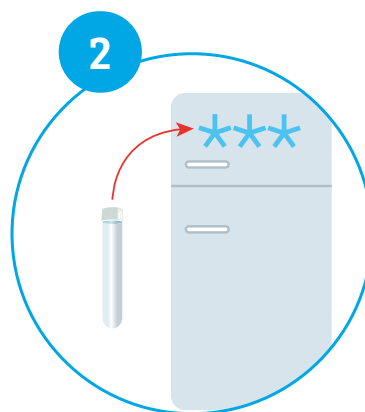


Probe in
das Gefrierfach **stellen**.
(Blut für Serum bzw. Plasma
vorher abzentrifugieren)


KURZ VOR DER ABHOLUNG

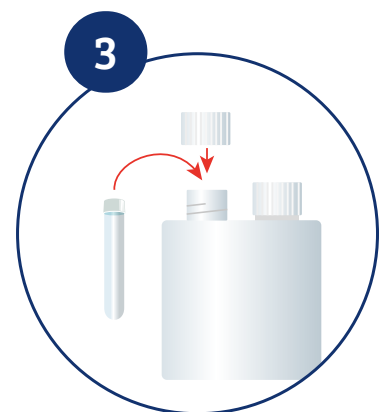

Durchgefrorene Probe
in Kunststoffbehälter
stellen.

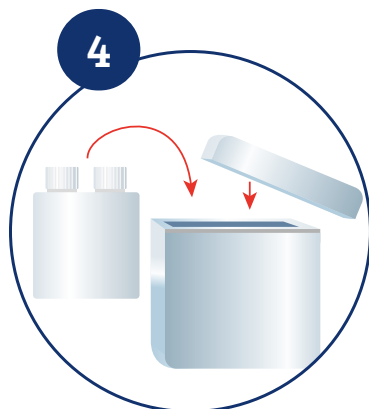

Und dann
Kunststoffbehälter in
Styropor-Box stellen.

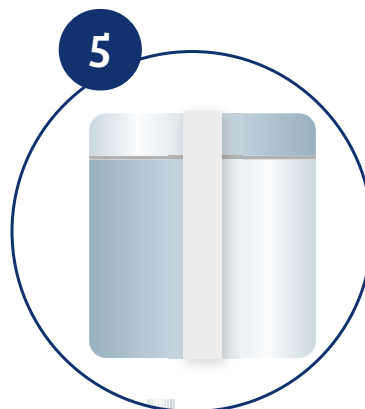

Deckel mit
Gummiband sichern.



Styropor-Box und
Anforderungsschein
dem Fahrer mitgeben.

Sie erhalten den Kühlbehälter gereinigt und mit neuer Versandtasche von uns zurück.
Für die Rücksendung berechnen wir eine anteilige Pauschale von 3 € (Ausland 6 €).